

## **BOOMERANG SANS CHAINETTE**

### **AVIS TRÈS IMPORTANT**

Ce modèle de BOOMERANG sans marqueur métallique, est fabriqué par exception et sur demande particulière. Normalement, nous nous donnons un trouble considérable pour incorporer une chaînette opaque. En voici la raison.

Sans elle, si une corne se superposait accidentellement à une partie de l'anatomie, l'artéfact ainsi engendré pourrait ressembler à une tumeur ou une autre lésion similaire. Ceci risquerait alors de causer une erreur diagnostique susceptible d'entraîner une poursuite légale. L'emploi de ce filtre sans chaînette est donc fait en toute connaissance des risques inhérents.

Nous suggérons plutôt l'emploi d'un BOOMERANG **régulier avec chaînette**, prévenant ainsi tout risque inutile. La chaînette se projette normalement à l'extérieur de l'anatomie où elle n'est pas nuisible. Si une superposition accidentelle se produisait, elle serait d'emblée évidente. Un avantage additionnel consiste en la vérification sur le film de la position correcte du BOOMERANG: en effet la distance entre la chaînette et la peau indique le degré de filtration appliqué.

#### **MISE EN GARDE**

Doit être utilisé par un personnel compétent, selon des procédures appropriées, et sous la responsabilité d'un médecin. OCTOSTOP<sup>®</sup> Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences, ou toute situation directe ou indirecte en relation avec ses produits.