

INSTRUCTIONS

A-P STOP (# AP-1)

Ce nouveau système est basé non pas sur la peau, laquelle glisse jusqu'à 2 cm sur l'os, mais bien sur les os mêmes du crâne, à la fois en *antérieur (A)* et en *postérieur (P)*.

LOUP et BONNET

En AVANT, un masque (LOUP) se fixe intimement sur les os du nez et des sourcils. En POSTÉRIEUR un BONNET enveloppe le reste de la tête. Des ancrages de Velcro® sont incorporés dans les pièces pour les unir ensemble. Le tout forme un boîtier ferme et efficace. Ainsi la tête peut bouger d'une couple de millimètres, mais revient toujours à sa position initiale.

Les pièces sont faites de polyuréthane eau de roche flexible. Le degré de pression appliquée est donc immédiatement évident d'après la couleur de la peau. L'absorption du matériau est égale à celle de l'eau, ce qui n'ajoute que très peu de masse à la tête (5 mm), tout en lui conférant une forme régulière et utile. En RM le polyuréthane ne produit aucun signal. La désinfection se fait à l'alcool ou au Zephiran.

PRÉPARATION des ANCRAGES




Collez une bande de crochets Velcro sur le support de tête pour ancrer un coussin mousse ou le bonnet.




Un auto-collant feutre Velcro blanc est collé derrière le bonnet sur la ligne médiane. Remplacez au besoin.

Collez des segments de crochets de Velcro® auto-collants

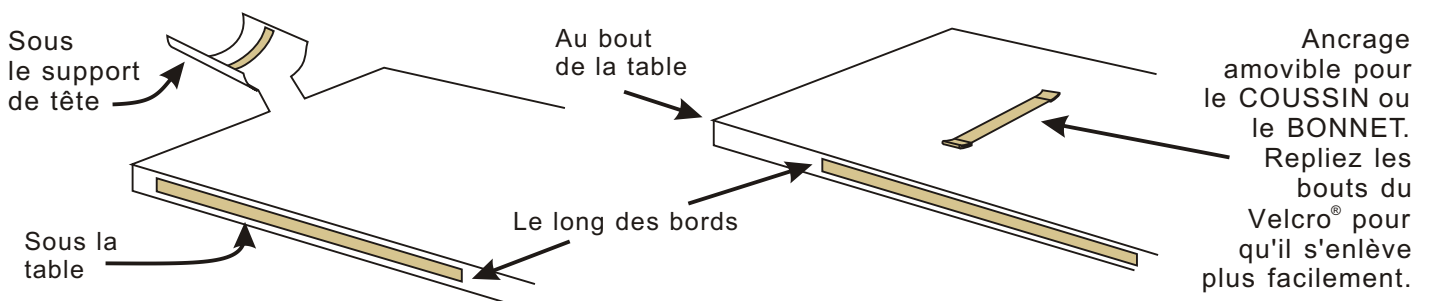

DEGRÉS PROGRESSIFS D'IMMOBILISATION

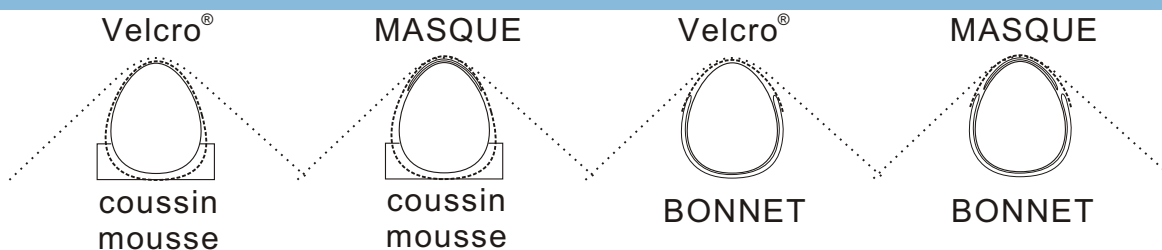


INSTALLATION du BONNET et du MASQUE



Préparez le malade en lui expliquant les raisons de l'emploi du masque et du bonnet: à savoir un examen plus précis, moins de risque de reprise et sans adhésif cutané. Désinfectez à l'alcool ou du Zephyran®. Démontrez sur vous-même comment le masque est acceptable. Un malade bien informé, ayant essayé le masque auparavant, pourra l'installer lui-même.

Appuyez fermement le BONNET vers les pieds contre le sommet de la tête. Déposez le LOUP délicatement en l'ajustant sur le nez et les sourcils avec une légère pression. Surveillez la décoloration de la peau et l'absence de douleur.

Les COURROIES de Velcro® blanc pour la TÊTE

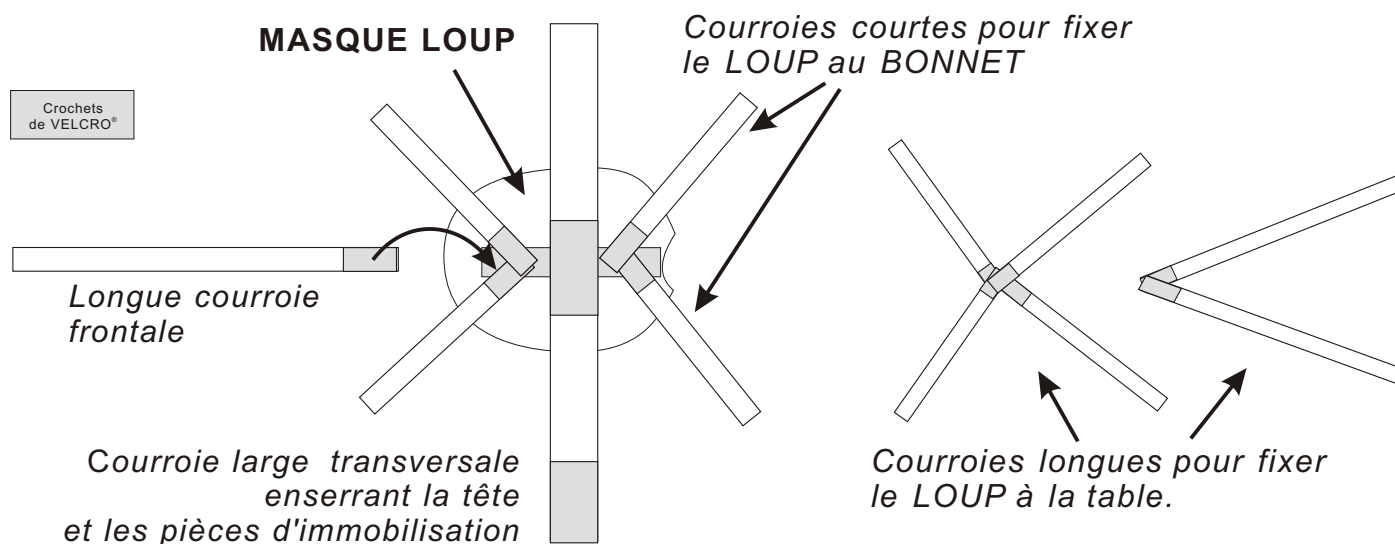

Suggestion: ranger les courroies au mur sur un auto-collant

IMMOBILISATION

Toute méfiance envers le système disparaît toujours lorsqu'on l'essaie sur soi-même. Il est donc capital que les technologues pratiquent entre eux (elles) avant de l'employer sur les malades. Ceci réduit la durée de la préparation et améliore les examens.

Toujours appliquer le côté velours du Velcro® vers la peau. Les crochets ne doivent pas égratigner la peau.

Il y a plusieurs manières de fixer la tête et les pièces avec le Velcro®, et il y a toutes sortes de malades et de situations.

Commencez par fixer le MASQUE au BONNET au moyen de quatre courroies courtes (18 cm); on peut auparavant insérer de chaque côté les disques fournis sous le bonnet et par-dessus le loup, ce qui améliore beaucoup la fixation (voir vidéo). Ensuite, selon le cas, la courroie large transversale et/ou d'autres courroies longues en "I", "X" ou en "Y" fixeront le LOUP à la têtère et à la table.



Exemple de fixation postérieure avec une MOUSSE et antérieure avec le LOUP. La courroie **large** est placée *transversalement au niveau des sourcils*. Celle du **front** est à peine visible et va en arrière sous la têtère; deux courroies **obliques** atteignent les côtés de la table, complétant un "Y".



Exemple d'immobilisation plus efficace grâce au BONNET et au LOUP. Des disques (invisibles ici) peuvent être insérés de chaque côté sous le BONNET et par-dessus le LOUP; puis des courroies **courtes** les funissent. Une courroie **longue** fixe le tout au support de tête.

ATTENTION

1. Le polyuréthane est inflammable et sa fumée est toxique.
2. Le polyuréthane est fragile et se casse facilement.

AVIS IMPORTANT

Ne doit être utilisé que par un personnel qualifié, selon des procédures appropriées, et sous la responsabilité d'un médecin. OCTOSTOP® Inc. et son personnel n'assument aucune responsabilité concernant l'emploi, les indications, les conséquences, ou toute situation directement ou indirectement reliée à ses produits.